

## Kahva Intelligent- ja Vision-malleille

Steriloitava ja irrotettava kahva Merivaara Q-Flow Intelligent- ja Vision -kirurgiselle valaisimille. Kahva suositellaan vaihdettavaksi, kun se on steriloitu 1000 kertaa. Mikäli kahvassa on merkkejä materiaalin heikentymisestä, vaihda se heti.

- Kahva voidaan irrottaa ja steriloida erikseen.
- Kahvan sterilointi voidaan suorittaa höyryautoklaavissa instrumenteille tarkoitettua ohjelmaa käyttäen.
- Sterilointilämpötila höyryautoklaavia käytettäessä saa olla enintään 132 °C, kun sterilointi kestää kolme (3) minuuttia 2,0 baarin paineessa. Sterilointiaika on laskettu määrittämällä aika, jonka kuluttua steriloitava osa saavuttaa yllä määritellyn sterilointilämpötilan. Tämä aika ei sisällä steriloitavan osan lämmittämiseen ja jäädyttämiseen kuluvaan aikaan.



### Tilausnumerot:

5202801            1 kpl  
A43280901        10 kpl:n setti, harmaa

### Tekniset tiedot

Tuotekoodi	5202801, A43280901
Valmistaja	Merivaara Oy

## Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)