

Handle for Q-Flow minor lights

Sterilizable detachable handle for Merivaara Q-Flow 1 and Q-Flow 2 lights. Can be also used with monitor holders. Замену ручки фокусировки рекомендуется производить с интервалом 1000 циклов стерилизации. Немедленно замените ручку фокусировки при появлении признаков разрушения материала.

- Ручка фокусировки снимается и стерилизуется отдельно.
- Стерилизация ручки фокусировки может проводиться в автоклаве в режиме для инструментов.
- Максимальная температура стерилизации в автоклаве составляет 132 °C в течение 3 (трех) минут при давлении 2,0 бар. Продолжительность стерилизации определяется тем, достигли ли стерилизуемые детали указанной выше температуры стерилизации. Время прогрева и охлаждения стерилизуемых деталей не учитывается.



Order no.

485492B 1 pc
48549210 Set of 10 pcs, grey

Technical Specifications

Product Code	485492, 48549210

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com