



Operationsbord

 **MERIVAARA**

Fluent usability

Sedan 1901

"I tillägg till den höga tillverkningskvaliteten, ägnar vi mycket arbete åt att optimera utrustningens funktionalitet. Som ett led i detta har vi bett ett stort antal erfarna läkare att bidra med råd och synpunkter på produkterna."

Juho Merivaara 1926, Merivaaras grundare



I moderna operationssalar på 1950-talet justerade personalen bord och belysning för hand.


**DESIGN[®]
FROM
FINLAND**



Vi är stolta över att företagets grundvärden för 120 år sedan var så långt före sin tid att de fortfarande kan tillämpas fullt ut vid utveckling av nya innovativa lösningar för vårdpersonal. Och dessa värden återspeglas i våra senaste prisbelönta produkter, Q-Flow operationslampa och operationsbordet Smarter Practico, som har utvecklats för optimal funktionalitet och användarvänlighet. Våra användargränssnitt utvecklas tillsammans med sjukhuspersonal, så att alla våra produkter och system kan användas intuitivt.

Vi kallar detta Fluent usability; personalen i operations-salen kan fokusera på patienten och behöver inte oroa sig över invecklad teknik. Det är något som uppskattas av de främsta kirurgerna i hela världen.



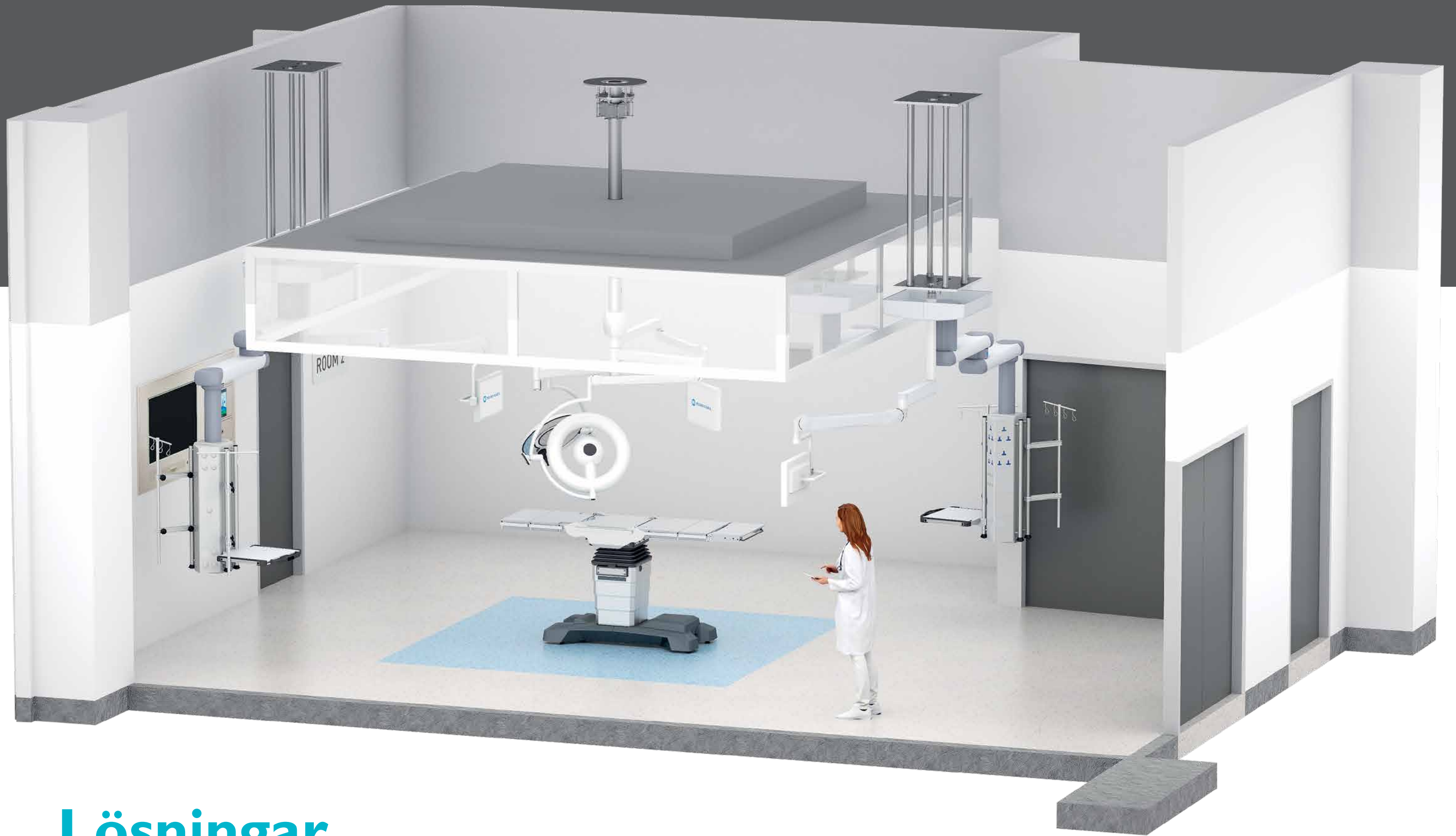

Lösningar

Merivaara erbjuder en rad produkter, system och tjänster av hög kvalitet för operationssalar. Våra lösningar garanterar inte bara patientsäkerheten, de är också mycket prisvärda.

Vi utvecklar produkter och lösningar med hela operationsteamet i åtanke, och det är viktigt för oss att lyssna på kundens behov. På så sätt säkerställer vi att teamet kan genomföra procedurerna på ett säkert, snabbt och effektivt sätt. Det innebär ett förbättrat arbetsflöde och att hela teamet blir mer produktivt.


Merivaara har lång erfarenhet av att leda och genomföra projekt i operationssalar. Det är mycket viktigt för oss att projekten håller tidsramen och att begränsa kostnaderna.

- OPERATIONSGLAMPOR • UNDERSÖKNINGSLAMPOR
- OPERATIONSBORD • TILLBEHÖR TILL BORD
- INTEGRATIONSSYSTEM • MONITORER & MONITORARMAR
- PENDLAR • PROJEKT • MERIVAARA-TJÄNSTER

Smarter Practico

Operera högt och lågt


FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION

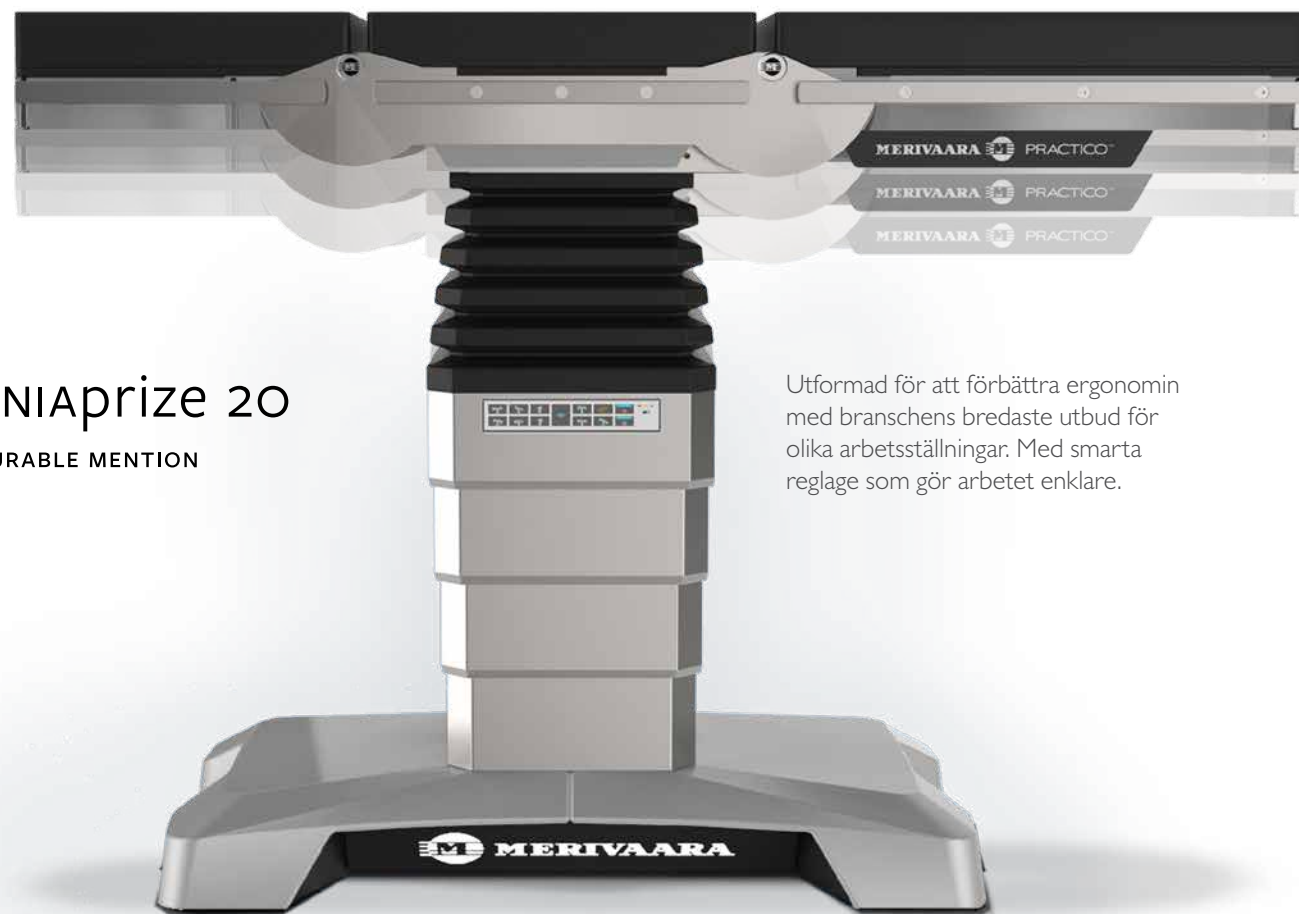

Utformad för att förbättra ergonomin med branschens bredaste utbud för olika arbetsställningar. Med smarta reglage som gör arbetet enklare.

Höjdpunkter

Med förbättrade funktioner kan du fokusera på din uppgift medan den fantastiska ergonomiska designen förbättrar komforten för hela operationspersonalen. Komfort leder till fokus, förtroende och bättre samarbete. Det är effektivitet!

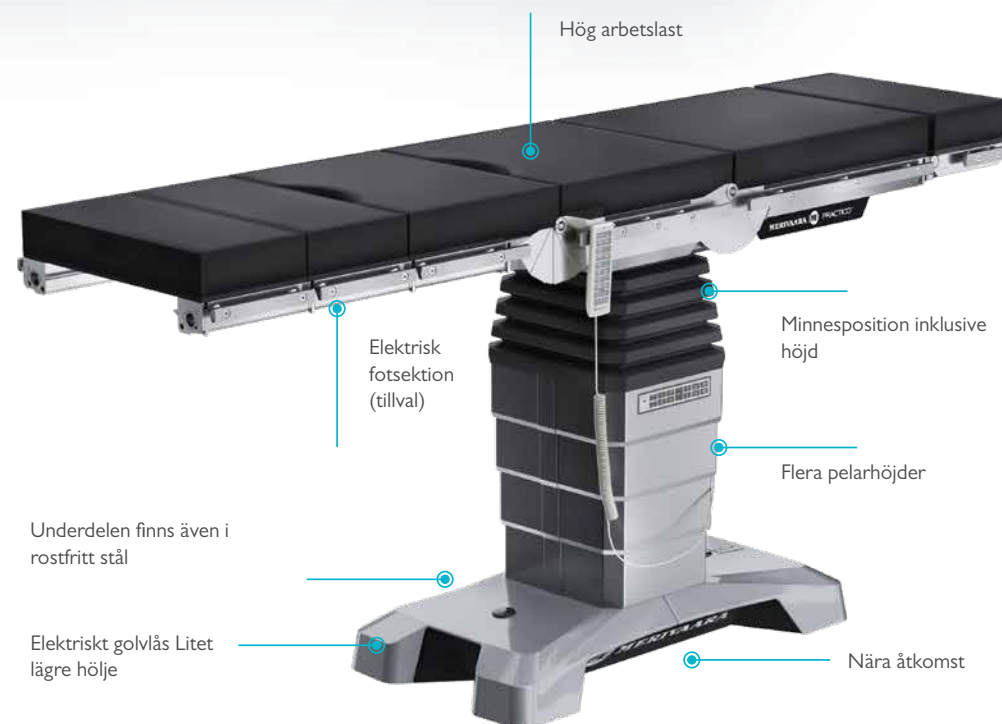

Fördelar med Smarter Practico



1. FÖRBÄTTRAD ERGONOMI

- Välj mellan flera pelarhöjder: allmän, låg, hög
- Kan anpassas till den kirurgiska applikationen – kan enkelt anpassas till flera kirurgiska applikationer
- Ergonomiskt fokus för både operationspersonalen och patienten




2. SÄKER OCH STARK

- Upp till 280 kg i alla riktningar inklusive förskjutning
- Lämpad för bariatrisk kirurgi med stort tillbehörsutbud
- Lyftkapacitet 460 kg



3. SMIDIG ÅTKOMST

- 360-graders C-arm-åtkomst tack vare underdelens låga höjd
- Tack vare den rundade underdelen får kirurgen närmare åtkomst till patienten.
- 390 mm långsgående förskjutning ger bättre C-arm-åtkomst för röntgen och fluoroskopisk bildtagning

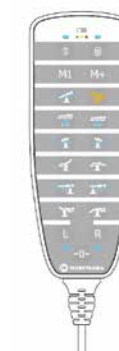

4. SMART HANDKONTROLL

- Lättanvänt gränssnitt
- Smidig design och bekväm att hålla i
- Snabba minnesfunktioner
- Säker och enkel användning i svagt ljus tack vare endoskopiskt läge
- Praktisk batteristatusindikator



5. SMARTA RÖRELSE

- Bordets smarta styrsystem känner av situationer med risk för mekaniska kollisioner.
- Flera anti-kollisionsjusteringar, t.ex. vid djup Trendelenburg.
- Styrsystemet genomför automatiskt rätt kompensationsrörelser för säkra och smidiga justeringar.

ELEKTIV ORTOPEDISK KIRURGI

Smarter Practico för elektiv ortopedi är den flexibla lösningen för alla operationssalar som genomför elektiv ortopedisk kirurgi. Tack vare dess breda höjdställningsområde är Smarter Practico den ergonomiska lösningen för operationssalen.



HÖFTKIRURGI

De anpassningsbara höjderna förbättrar ergonomin för kort och lång personal oavsett om de står eller sitter.



LÄGRE EXTREMITETERNA

Tillsammans med ortopediska förlängningslösningar uppfyller Smarter Practico kraven för dagens operationssalar.



KNÄKIRURGI

Max Hi Smarter Practico är ergonomiskt utformad för lång personal. Den smidiga underdelen är utformad för att möjliggöra ostörd och närmare åtkomst till operationsområdet.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Höftkirurgi
- Knäkirurgi
- Fot- och fotledskirurgi
- Handkirurgi
- Lårbens-/skenbenskirurgi
- Armbågs-/överarmbenskirurgi

ORTOPEDISK AXELKIRURGI

Smarter Promerix för ortopedi är den flexibla lösningen för alla operationssalar som genomför ortopediska axeloperationer. Beach chair-sektionen möjliggör enkel åtkomst till operationsområdet. Smarter Practico har ett stort höjdställningsområde och är därmed den perfekta ergonomiska lösningen för operationssalen.



FULLSTÄNDIG ÅTKOMST TILL AXELPARTIET

Den stora utskärningen i beach chair ger utmärkt kirurgisk åtkomst.



UTMÄRKT POSITIONERING AV PATIENTEN

Smidiga rörelser garanteras tack vare Smarter Practicos smarta styrsystem.

“ Utskärningen i ryggsektionen möjliggör bättre åtkomst till axelpartiet och förbättrade patientarmrörelser.

Dr Kari Salovaara, ortopedisk kirurg
vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Finland



SÄKRAD POSITIONERING


Beach chair-stödremmen säkerställer säker positionering av patienten utan att störa operationsområdet.



ANVÄNDARVÄNLIG

Den smarta och smidiga låsmekanismen gör det möjligt att snabbt frisläppa den borttagningsbara utskärningen i ryggsektionen.

SPECIALTILLBEHÖR

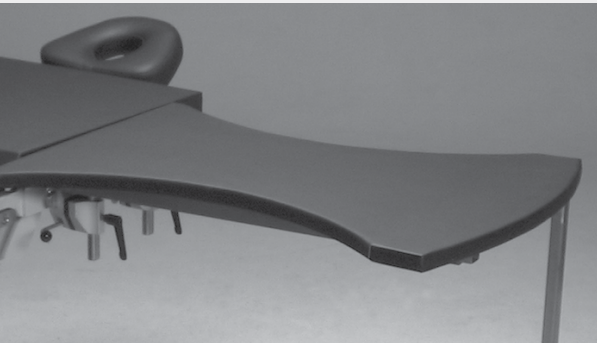

HANDOPERATIONSBORD I0390



STRÄCKNINGSSATS FÖR ÖVERARMSBEN I I0438

SPECIALTILLBEHÖR



BEACH CHAIR HJÄLM-HUVUDSTÖD 30128



ARMPLATTA FÖR FLERA UPPGIFTER I I802

OFTALMISK KIRURGI

Smarter Practico för oftalmologi – bästa möjliga ergonomi. Tack vare det stora höjdställningsområdet ger Smarter Practico utmärkt ergonomi för personal oavsett längd.

“Minnespositionerna gör repetitiva operationer effektiva. Madrasserna kändes bra och gav bra stöd – bättre komfort för patienterna.

Uleåborgs universitetssjukhus, avdelningen för oftalmologi



LÄGST PÅ MARKNADEN

Smarter Practico är det perfekta valet för operationssalen tack vare dess mycket låga höjd på 540 mm. Merivaara tillhandahåller ett brett utbud av oftalmiska huvudsektioner som garanterar närhet till operationsområdet. Den strömlinjeformade underdelen garanterar optimalt fotutrymme för kirurgen.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Kataraktkirurgi
- Glaukomkirurgi
- Refraktiv kirurgi
- Kornealkirurgi
- Vitreoretinal kirurgi
- Extraokulär muskelkirurgi
- Okuloplastikkirurgi

Mer stöd för patienten



Mer arbetsutrymme för kirurgen



ÖRON-, NÄSA-, HALSKIRURGI

Smarter Practicos maximala låghet kan även användas för ÖNH-operationer.




SÄRSKILD ÖGON-ÖNH-RYGGSEKTION OCH HUVUDSTÖD

- Möjliggör mer närhet till patienten
- Ergonomisk både för patienten och slutanvändaren
- Garanterar stabilitet
- ÖNH-huvudstöd ger utmärkt artikulering

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Tonsillektomi
- Öronkirurgi
- ÖNH-onkologi
- Bihålekirurgi
- Septoplastik
- Rhinoplastik

SPECIALTILLBEHÖR

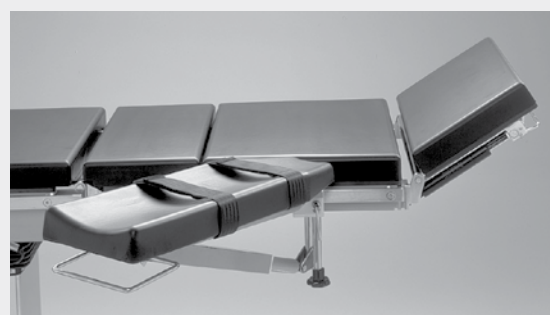


ARMSTÖD 125



ÖNH-KIRURGI-HUVUDSTÖD 18143

SPECIALTILLBEHÖR

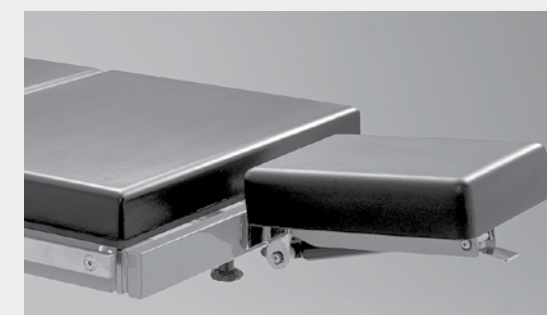

SMALT HUVUDSTÖD 142



ÖNH-OFTALMOLOGI-HUVUDSTÖD 18150

PLASTIKKIRURGI

Smarter Practico för plastik är den flexibla lösningen för alla operationssalar som genomför plastikkirurgi. Tack vare det stora höjdställningsområdet passar Smarter Practico för personal oavsett längd.

MAX LOW

Bordet är lätt att nå för patienterna och ger utmärkt ergonomi för en sittande kirurg.

SMIDIG ÅTKOMST

Den nya konstruktionen ger mer utrymme för kirurgens ben



APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Brösthörstoring: förstoring, lyft, minskning, rekonstruktion
- Ansiktskontureriing: rhinoplastik, hak- eller kindförbättring
- Ansiktsföryngriing: ansiktslyft, ögonlockslyft, halslyft, ögonbrynslyft
- Kroppskontureriing: bukplastik, fettsugning, gynekomastibehandling
- Ärrevisionskirurgi

GYNEKOLOGI OCH UROLOGI

Smarter Practico är den flexibla lösningen för alla operationssalar som genomför gynekologiska och urologiska ingrepp. Tack vare det stora höjdställningsområdet passar Smarter Practico för personal oavsett längd.

GYNEKOLOGISK KIRURGI



UTMÄRKT ÅTKOMST OCH SNABB OMPOSITIONERING

Tack vare den stora höjdställningen är Smarter Practico den ergonomiska lösningen för alla gynekologiska applikationer. Den snabba minnesfunktionen gör ompositionering enkel.

OSTÖRD BILDTAGNING

Den omfattande förskjutningsfunktionen ger enklare åtkomst för bildtagningsutrustning.

UROLOGISK KIRURGI



OÖVERTRÄFFAD ÅTKOMST FÖR KIRURGEN

Tack vare förskjutningsfunktionen kan britsen förskjutas mot kirurgen för bättre ergonomisk åtkomst till operationsområdet.


“ Kirurgens åtkomst är utmärkt. Den långsgående förskjutningen kommer väldigt väl till pass vid gynekologiska och urologiska ingrepp.

Erkki Riihinen, operationssalstekniker


APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Endometrioskopkirurgi
- Kirurgi för intryckta livmoder- och vaginalväggar
- Gynekologisk skrapning
- Behandling av tumörer i livmoder- muskelknutor (myom-behandling)
- Hysterektomi
- Hydroponisk borttagning
- Prostata-laserkirurgi
- Skrotalkirurgi
- Borttagning av sädesvätska (sperma)
- Undersökning av blåsan (cystoskopi)

SPECIALTILLBEHÖR

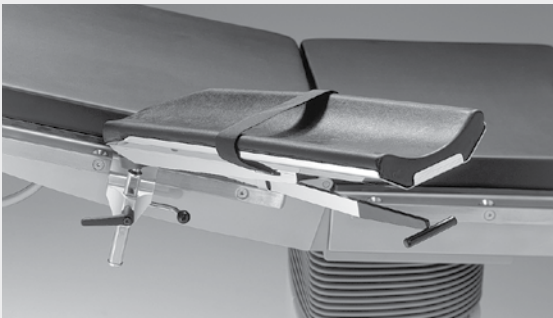

ARMSTÖD 19180

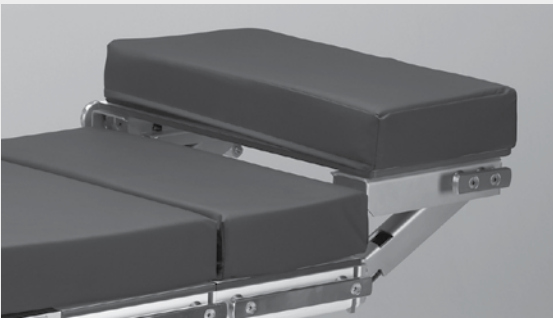

HUVUDSTÖD 60142

SPECIALTILLBEHÖR



K-TEK-STIGBYGLAR

Ger överlägsen åtkomst till bäckenet, större skostorlek och bättre infektionskontroll. Finns för pediatrik, vuxenvård och bariatri.



SKÅL 6 LITER UTAN DRÄNERING 201571

RYGGRADSKIRURGI

Smarter Practico är med sitt stora höjdställningsområde den perfekta lösningen för ryggradsapplikationer.



SPINAL FLOATING SYSTEM

Kostnadseffektiv britsplattform som passar alla standardoperationsbord. Ramen är helt radiolucet och tack vare kroppstöden kan buken hänga fritt för att minska ventrycket.

MAX HI OCH MAX LO

Förbättrad ergonomi för personal oavsett längd.

SMIDIG C-ARM-ÅTKOMST

Möjliggör intraoperativ bildtagning tack vare den omkonstruerade ramstrukturen.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Laminektomi
- Diskektomi
- Spinal fusion
- Vertebroplastik/kyfoplastik




“Bordets utformning gör bildtagning av C-arm enkel.

Sami Elamo, med dr, M.Sc. (teknisk), konsult inom ortopedisk och traumakirurgi

KOMPATIBILITET MED C-ARM

Smarter Practico och dess tillbehör möjliggör enkel C-arm-åtkomst.

ANDRA RYGGRADSLÖSNINGAR

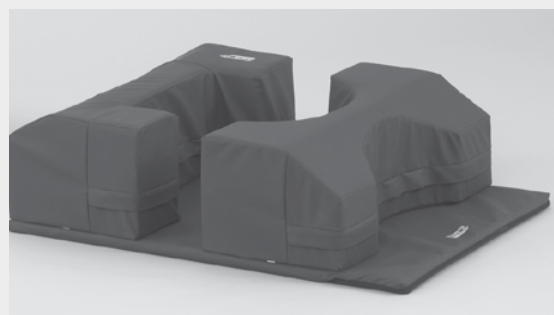

MADRASSATS FÖR FRAMSTUPALÄGE 60750

RYGGRADSKUDDE 12805



SPECIALTILLBEHÖR



K-TEK-STIGBYGLAR

Ger överlägsen åtkomst till bäckenet, större skostorlek och bättre infektionskontroll. Finns för pediatrik, vuxenvård och bariatri.



ARM-BEN-SKYDD 60485

OBSTETRISK KIRURGI

Smarter Practico är den flexibla lösningen för den obstetriska operationssalen. Tack vare anti-kollisions-funktionen klarar bordet Trendelenburg utan risk att kollidera med golvet. Tack vare den låga höjden krävs inget steg, vilket gör överföringen av patienten smidigare och säkrare.

“Operationsbordet är så lågt att gravida mammor enkelt kan sitta på det.



MAX HI OCH MAX LO

Förbättrad ergonomi för personal oavsett längd.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Kejsarsnitt
- Episiotomi
- Kolporafi
- Kolpotomi

TORAX- OCH NJURKIRURGI

Smarter Practico är den flexibla lösningen för ingrepp i torax. Nefrektomi-ingrepp uppnås enkelt tack vare den djupa rörliga fällknivspositionen eller med njurbryggmodellen.



RYGGSEKTION MED INBYGGD NJURBRYGGA

Ger komfort och ergonomi för patienten och kirurgen.



LÄNGSGÅENDE FÄLLKNIV

Kan enkelt uppnås tack vare den smidiga rörliga ryggsektionen.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Lungcancerkirurgi
- Emfysemkirurgi
- Matstrupskirurgi
- Partiell nefrektomi eller nephron-sparing surgery (NSS)
- Perkutan nefrostomi/nefrolitotripsi (tunnelkirurgi)

“Snabb konfigurerings
för enkel åtkomst
till njuområdet.

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Finland.

MINIMALINVASIV KIRURGI

Smarter Practico för minimalinvasiv kirurgi (MIS) är den flexibla lösningen för operationssalen.



ENKEL ÅTKOMST



BARIATRI



MAX HI OCH MAX LO

“Operationsbordet är utmärkt för bra och ergonomiska arbetspositioner.
Olika kirurgiska ingrepp kan göras med Smarter Practico.

Dr Jyrki Kössi, chef-gastroenterolog vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus i Finland



KOMPATIBILITET MED MOBILA C-ARMAR

Intraoperativ bildtagning är enkel och flexibel med Smarter Practico tack vare den smidiga konstruktionen.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Laparoskopi
- Bariatrisk kirurgi
- Tonsillektomi
- Appendektomi
- Cancerkirurgi
- Laparotomi
- Plastikkirurgi

SPECIALTILLBEHÖR



HUVUDSTÖD 60142

RUNT SIDOSTÖD 11651

ARMPLATTA FÖR FLERA UPPGIFTER 11802



Ett brett sortiment
av tillbehör finns i Merivaaras
tillbehörskatalog.

Avancerad konstruktion:

Rörliga bensektioner

Nedre bensektioner (kräver 60225 eller 60425)

Fluent



Övre bensektioner (fästs till sättesektionen)

Fluent



Ryggsektioner

2-stav




Övre ryggsektioner/adaptrar

Fluent



Huvudstöd

2-stav

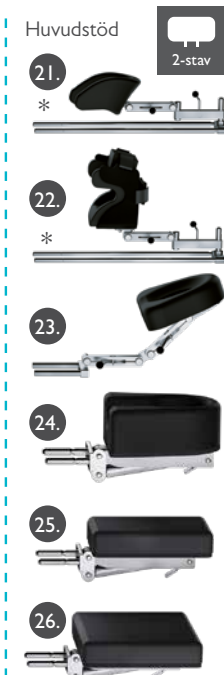

Fluent



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



23.



24.



25.



26.



28.



29.



DORO-adaptrar (fästs direkt på sidoskenorna)



* Rekommenderas för beach chair

Nr.	Ordernr	Namn	Mått	Vikt
1.	I000 30248	Korta delade bensektioner, gasfjäder-assisterade	540 × 680 × 260 mm	2 × 9,1 kg
2.	I000 30147	Bensektion i en del, gasfjäder-assisterad	540 × 650 × 260 mm	17,1 kg
3.	I000 60475	Lång delad bensektion, gasfjäder-assisterad	540 × 880 × 260 mm	2 × 9,9 kg
4.	I000 60250	25-sektion	540 × 250 × 80 mm	7,6 kg
5.	I000 60225	25 korta sektioner	540 × 250 × 80 mm	5,4 kg
6.	I000 60425	Gyn 25-sektion	540 × 250 × 80 mm	5,3 kg
7.	I000 145480	Kort delad bensektion, dubbelled		7,5 kg
8.	I000 60484	Delade bensektioner, i 4 sektioner	540 × 865 × 230 mm	25 kg
9.	I000 60201	Lätt fotstöd 60201	500 × 900 mm	5,2 kg
10.	I000 60204	Lätt bensektion för rörliga ben 60204	540 × 630 × 80 mm	4,9 kg
11.	I000 60440	Gyn 40-sektion	540 × 400 × 80 mm	8,9 kg
12.	I000 60240	40-sektion	540 × 400 × 80 mm	9,1 kg
13.		Beach chair-ryggsektion	540 × 650 × 200 mm	
14.		Ögon-ÖNH ryggsektion	540 × 630 × 200 mm	
15.		Njurbrygga	540 × 630 × 200 mm	
16.		Standard	540 × 630 × 200 mm	
17.		Kort rygg	540 × 500 × 200 mm	
18.	I000 60142	Huvudstöd 60142	540 × 300 × 80 mm	6,4 kg
19.	I000 60140	Huvudstöd 60140	540 × 300 × 80 mm	6,3 kg
20.	I000 60146	Huvudstöd-adaptrar 60146		2,5 kg
21.	I000 30126	Beach chair hjälm-huvudstöd 30126		4,6 kg
22.	I000 30128	Beach chair hjälm-huvudstöd 30128		4,3 kg
23.	I000 18150 I000 18151	Huvudstöd för önh-/oftalmologi 18150 eller 18151	225 × 290 × 60 mm	2,8–3,25 kg
24.	I000 18143	ÖNH-kirurgi-huvudstöd 18143	245 × 242 × 40 mm	3,4 kg
25.	I000 00142	Smalt huvudstöd 142	275 × 206 × 50 mm	4,1 kg
26.	I000 00141	Brett huvudstöd 141	275 × 406 × 50 mm	4,5 kg
27.	I003 00700	DORO-adaptrar	700 × 680 × 60 mm	4,4 kg
28.	I010 01100	DORO huvudstödsystem i aluminium	550 × 600 × 470 mm	5,4 kg
29.	I003 00900	DORO hästskeformat huvudstöd	250 × 450 × 200 mm	2,1 kg



Tillgänglig med viskoelastiskt skum (VEF) med förstklassig patientkomfort mot trycksår.



Allmän konstruktion: Icke-rörliga bensektioner

Nedre bensektioner

Fluent

Övre bensektioner
(fästs till sättessektionen)

Fluent

Ryggsektioner

2-stav

Övre ryggsektioner /
adaptrar

Fluent

Huvudstöd

2-stav

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



2.



2.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



22.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



18.



19.



20.



21.



23.



24.



DORO-adaptrar
(fästs direkt på sidoskenorna)


* Rekommenderas för beach chair

Nr.	Ordernr	Namn	Mått	Vikt
1.	I000 20114	Fotstöd/bordsförlängning 20114	700 × 170 × 455 mm	5,8 kg
2.	I000 60250	25-sektion	540 × 250 × 80 mm	7,6 kg
3.	I000 30248	Korta delade bensektioner, gasfjäder-assisterade	540 × 680 × 260 mm	2 × 9,1 kg
4.	I000 60475	Lång delad bensektion, gasfjäder-assisterad	594 × 880 × 260 mm	
5.	I000 30147	Bensektion i en del, gasfjäder-assisterad	540 × 650 × 260 mm	17,1 kg
6.	I000 60201	Lätt fotstöd 60201	500 × 900 mm	5,2 kg
7.	I000 60203	Lätt icke-rörlig bensektion 60203		4,9 kg
8.		Beach chair-ryggsektion	540 × 650 × 200 mm	
9.		Ögon-ÖNH ryggsektion	540 × 630 × 200 mm	
10.		Njurbrygga	540 × 630 × 200 mm	
11.		Standard	540 × 630 × 200 mm	
12.		Kort rygg	540 × 500 × 200 mm	
13.	I000 60142	Huvudstöd 60142	540 × 300 × 80 mm	6,4 kg
14.	I000 60140	Huvudstöd 60140	540 × 300 × 80 mm	6,3 kg
15.	I000 60146	Huvudstöd-adaptrar 60146		2,5 kg
16.	I000 30126	Beach chair hjälm-huvudstöd 30126		4,6 kg
17.	I000 30128	Beach chair hjälm-huvudstöd 30128		4,3 kg
18.	I000 18150 I000 18151	Huvudstöd för önh-/oftalmologi 18150 eller 18151	225 × 290 × 60 mm	2,8–3,25 kg
19.	I00018143	ÖNH-kirurgi-huvudstöd 18143	245 × 242 × 40 mm	3,4 kg
20.	I000 00142	Smalt huvudstöd 142	275 × 206 × 50 mm	4,1 kg
21.	I000 00141	Brett huvudstöd 141	275 × 406 × 50 mm	4,5 kg
22.	I003 00700	DORO-adaptrar	700 × 680 × 60 mm	4,4 kg
23.	I010 01100	DORO huvudstödsystem i aluminium	550 × 600 × 470 mm	5,4 kg
24.	I003 00900	DORO hästskeformat huvudstöd	250 × 450 × 200 mm	2,1 kg




Tillgänglig med viskoelastiskt skum (VEF) med
förstklassig patientkomfort mot trycksår.



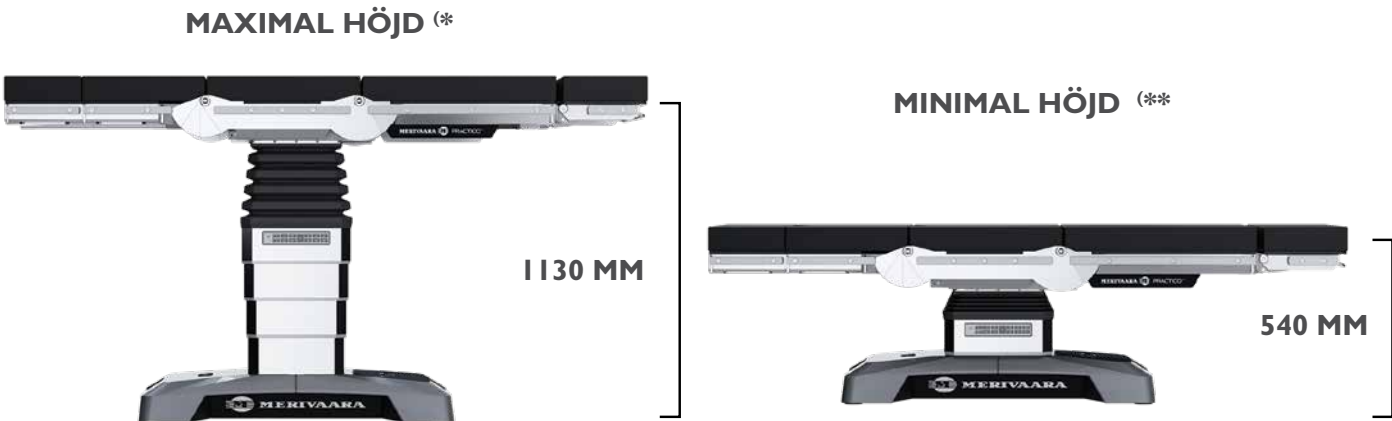

RÖRLIGA BEN- OCH RYGGSEKTIONER

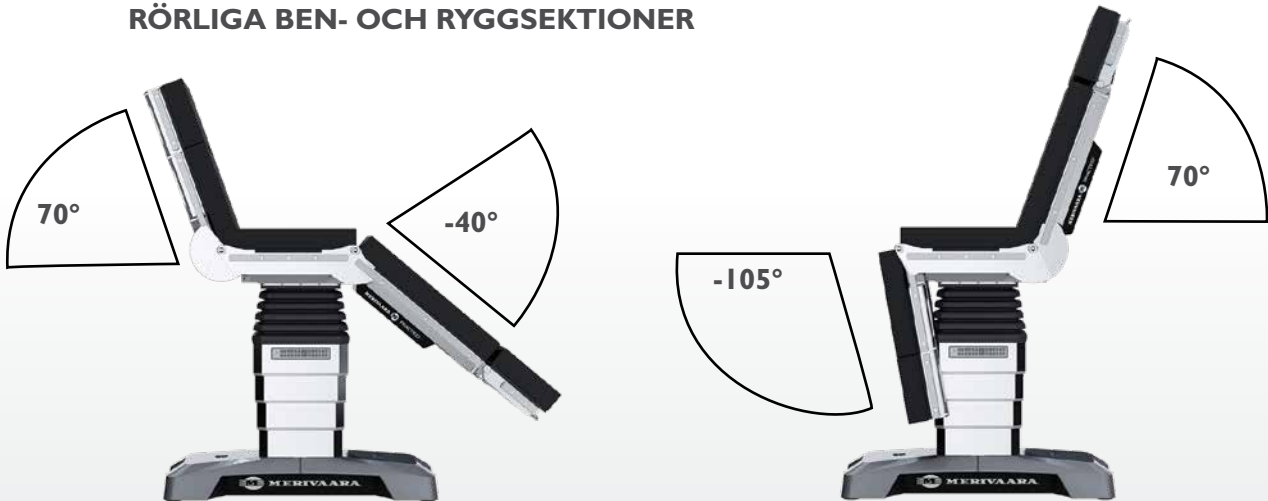

LUTNINGSVINKEL



TRENDELENBURG-VINKEL



FÖRSKJUTNINGSBEN
260 MM



FÖRSKJUTNINGSHUVUD
130 MM



(*) MAX HIGH PELARE (**) MAX LOW PELARE

Tekniska specifikationer

	Förskjutning och rörliga bensektioner	Ingen förskjutning, rörliga bensektioner	Förskjutning, inga rörliga bensektioner	Ingen förskjutning, inga rörliga bensektioner
Trendelenburg-vinkel (grader)	± 30	± 30	± 30	± 30
Lutningsvinkel (grader)	± 20	± 20	± 20	± 20
Förskjutning (mm/tum)	390/15,6"	–	390/15,6"	–
Ryggsektionens vinkel (grader)	+ 70/- 40	+ 70/- 40	+ 70/- 40	+ 70/- 40
Rörliga bensektioners vinkel (grader)	+ 70/- 105	+ 70/- 105	–	–
Icke-rörliga bensektioners vinkel (grader)	–	–	+ 20/- 90	+ 20/- 90
Practico Max Lo-höjd (mm/tum)	540-1030/21,3"-40,6"	553-1043/21,8"-41,1"	540-1030/21,3"-40,6"	-
Practico Max Hi-höjd (mm/tum)	640-1130/25,2"-44,5"	653-1143/25,7"-45"	640-1130/25,2"-44,5"	-
Practico allmän höjd (mm/tum)	585-885/23"-34,8"	-	585-885/23"-34,8"	598-898/23,5"-35,4"
Britsens bredd (mm/tum)	540/21,3"	540/21,3"	540/21,3"	540/21,3"
Antal britssektioner	4-6	4-6	4-6	4-6
Säker arbetslast	280 kg/617,3 lb	280 kg/617,3 lb	280 kg/617,3 lb	280 kg/617,3 lb
Lyftkapacitet	460 kg/1014,13 lbs	460 kg/1014,13 lbs	460 kg/1014,13 lbs	460 kg/1014,13 lbs
Antal minnespositioner	1	1	1	1
Femte hjul som tillval	✓	✓	✓	✓
IR-kompatibilitet med OPEN OR	–	–	–	–
Madrasstyp	VEF 80 mm	VEF 80 mm	VEF 80 mm	VEF 80 mm
Elektriska bromsar	✓	✓	✓	✓
Batteridrift (litiumjon)	✓	✓	✓	✓
Kompatibel med standard-ryggsektion	✓	✓	✓	✓
Kompatibel med beach chair-ryggsektion	–	✓	–	✓
Kompatibel med ögon-ÖNH-ryggsektion	✓	✓	✓	✓
Kompatibel med ryggsektion med njurbrygga	✓	✓	✓	✓
Officiellt produktnamn: Practico I45000				

Tillverkare: Merivaara Corp.

✓ = ingår – = ej tillgänglig



Health Technology with a Human Touch

Tillverkad i Finland med respekt för vår unika natur.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finland, Tel. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA GLOBALT

Merivaaras huvudkontor, med F&U-, produktions-, sälj- och marknadsföringsavdelning samt efterförsäljningsservice, finns i Lahti, Finland. Merivaara har dotterbolag i Sverige (Merivaara AB), Storbritannien (Merivaara Ltd) samt en säljorganisation i Ryssland. Dessutom säljs Merivaaras produkter i fler än 120 länder via ett nätverk av distributörer.

Status för information, specifikationer och illustrationer i denna publikation indikeras av publikationsdatumet. Även om största omsorg har ägnats åt dess sammanställning, ansvarar Merivaara Corp. inte för eventuella fel eller utelämnanden. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att göra ändringar i teknik, funktioner, specifikationer och utformning av utrustning och modeller utan föregående meddelande. Se Merivaaras webbplats för de senaste uppdaterade specifikationerna och annan information.

Alla varumärken tillhör Merivaara om inget annat anges. Patent godkända eller väntar på godkännande.

©Merivaara Corp. DOK.ID: 6172SV-1, Datum: 11/2023